

YWSH FFP2 NR 5-vrstvý respirátor

Kompletní specifikace

Detailní popis produktu 1) 5 vrstev 2) dlouhé šňůrky 3) vytištěné CE a EN na respirátoru 4) schválená firma Čínským min. zdrav. 5) zašitá spona na nos 6) ověřená platnost certifikátu 7) balené samostatně po jednom kuse ve folii

Informace k respirátorům:

Respirátor FFP2 s filtračním efektem min. 95% brání průniku mikroorganismů (bakterie, viry, spory plísní), jemného prachu a toxických tuhých či kapalných částic zvenku dovnitř a tím chrání dýchací ústrojí uživatele.

Tento respirátor třídy FFP2 odfiltruje nejméně 95% pevných částic vdechovaného vzduchu.

Neobsahuje výdechový ventil a lze jej tedy použít pro běžné nošení místo látkových roušek avšak s mnohem větší efektivitou.

Nasazení respirátoru provádějte vždy s důkladně vyčištěnýma rukama, tak aby po celém obvodu co nejlépe přilnul k obličejí. Při sundávání se dotýkejte pouze popruhů, ne části, která filtruje vzduch.

Filtrační vrstvy:

Netkaný ochranný povlak

Prachový filtr

Micro-bakteriální filtr

Filtr z nano-vláken

Příjemný materiál, který nedráždí pokožku

Vlastnosti produktu:

Velikost: univerzální

Nosní svorka

Pohodlné gumičky za uši

Záruka: 2 roky

Maximální účinnost – doba užívání 8 hod. plného provozu

Odfiltrování až 95% pevných částic vdechovaného vzduchu

NÁVOD K POUŽITÍ:

- 1) Před nasazením respirátoru si důkladně umyjte ruce.
- 2) Respirátor si přiložte k nosu, přidržte jednou rukou a druhou si nandejte gumičky za uši nebo přes hlavu. Respirátor musí přiléhat podél tváří a pod bradou.
- 3) Po 8 hodinách respirátor vyměňte za nový.
- 4) Pokud si respirátor opakovaně nandáváte a sundáváte, vždy jej držte za gumičky a nedotýkejte se samotného respirátoru.
- 5) Použitý respirátor vložte do igelitového sáčku, který uzavřete a poté můžete vyhodit do koše.

Toto zboží nelze z hygienických důvodů vrátit ve 14-ti denní lhůtě.

Výrobek je osobním ochranným prostředkem podle nařízení EP a Rady (EU) 2016/425