

## Upozornění a podmínky používání respirátoru FFP2 NR

Nepoužívejte respirátor proti plynům a parám.

Není dovoleno čištění, praní ani dezinfekce. Výrobek je určen pouze pro jednorázové použití. Maximální doporučená doba použití je 8 hodin. Před použitím si ověřte, že respirátor poskytuje dostatečnou ochranu pro váš účel použití.

Výrobek vyjměte z originálního obalu bezprostředně před použitím. Pro správnou funkčnost není vhodné výrobek používat, pokud jsou na obličeji hluboké jizvy nebo jsou pod okraji respirátoru vousy. Okraje respirátoru musí přiléhat těsně na obličej. Respirátoru se po nasazení nedotýkejte. Respirátor nenoste zavěšený na krku. Před použitím i po použití si myjte a dezinfikujte ruce. Výrobek skladujte v originálním obalu. Po použití zlikvidujte v souladu s platnými předpisy. Nevystavujte přímému slunečnímu záření, chemikáliím, vlhkosti ani prachu. Nepoužívejte, pokud je výrobek poškozen nebo pokud je překročeno datum spotřeby. Není dovoleno výrobek, jakkoliv upravovat nebo opravovat. Při nedodržení pokynů k použití může být ohroženo zdraví uživatele.

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud je vzduch silně znečištěný, máte závratě nebo se vám svírá hrudník či máte potíže s dýcháním, okamžitě opusťte danou oblast a respirátor si sundejte.

**Podmínky skladování:** Okolní teplota: od -30 do +40 °C.  
Relativní vlhkost vzduchu: max. 80 %.

Vyrobena 1. 3. 2021. Spotřebujte do 1. 3. 2024.